

DOPASOWANIE

• Soczewka musi odpowiednio przemieszczać się po oku celem odpowiedniego dopasowania. Jeśli dopasowanie jest utrzymywane za zbyt ciasne, pacjentowi należy ponownie dopasować soczewki, które spełniają kryteria dobrze dopasowanych soczewek.

• Techniki dopasowania stosowane w przypadku innych soczewek kontaktowych mogą nie mieć zastosowania w przypadku tych soczewek.

HARMONOGRAM NOSZENIA

Zaleca się, aby osoba nosząca soczewki kontaktowe spotykała się ze specjalistą dwa razy do roku lub w razie zaleceń specjalisty.

Noszenie codzienne:

W przypadku NOWEGO pacjenta noszącego soczewki codziennie może początkowo występować tendencja do ich zbyt długiego noszenia. Początkowo harmonogram noszenia soczewek dla takich pacjentów powinien zostać wyraźnie podkreślony. Harmonogram noszenia powinien zostać wyznaczony przez specjalistę.

Maksymalny surowy czas noszenia dla soczewek PEGAVISION wynosi:

DOBA	1	2	3	4	5	6
GODZINY	5	7	10	12	14	

NIE WOLNO nosić soczewek w ciągu nocy lub podczas snu.

OKRESOWA/PLANOWANA WYMIANA

W planowaniu zmian wymiany harmonogram wymiany określany jest przez specjalistę na podstawie stanu fizjologicznego pacjenta. Producent soczewek kontaktowych PEGAVISION zaleca następujący harmonogram wymiany dla tych soczewek, do przepisania w Planowanym programie wymiany. (Specjalista może zalecić krótsze lub dłuższe od sugerowanych interwały wymiany na podstawie wyników badań klinicznych pacjenta, profesjonalnej oceny i doświadczenia klinicznego z soczewkami, ponieważ różna jest reakcja indywidualna na soczewki).

• Jednorazowe miękkie soczewki kontaktowe z hydrozylu silikonowego, do codziennego noszenia: Wymieniać codziennie

Harmonogram noszenia (UWAGI PATRZ P. CZAS NOSZENIA)

	Zawartość wody	Harmonogram utylizacji	Blokowanie UV	Noszenie
Soczewka kontaktowa do codziennego noszenia				
Jednorazowe miękkie soczewki kontaktowe z hydrozylu silikonowego, do codziennego noszenia	50%	1 doba	Tak	Codziennie

ZALECENIA DOTYCZĄCE PIELĘGNACJI SOCZEWKI

• Soczewki codziennie są myte przy użyciu wody z odciepku ich z oka każdego dnia.
• Soczewki codziennie powinny być czyszczone, płukane i dezynfekowane jedynie w sytuacjach awaryjnych, kiedy nie ma możliwości wymiany soczewki na nową. (Patrz PODSTAWOWE INSTRUKCJE CZYSZCZENIA, PŁUKANIA I DEZYNFEKCJI SOCZEWKI poniżej).

Planowana wymiana:

Pacjenci muszą przestrzegać zalecanego trybu postępowania przy pielęgnacji. Nieprzestrzeganie całości trybu postępowania zgodnie z informacjami producenta zawartymi na ulocie w opakowaniu oraz zaleceń dla pacjenta może spowodować problemy i/lub doprowadzić do rozwoju poważnych komplikacji ocznych zgodnie z opisem w punkcie OSTRZEŻENIA.

Specjaliści powinni omówić z pacjentem zalecenia dotyczące pielęgnacji soczewek, w tym zarówno podstawowe informacje o pielęgnacji, jak i szczegółowe instrukcje dotyczące zalecanego dla pacjenta trybu postępowania przy pielęgnacji. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE PIELĘGNACJI SOCZEWKI i zalecenia podstawowe.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE PIELĘGNACJI SOCZEWKI

Poniższe rozorty są zalecanymi rozortami do pielęgnacji soczewek do użyciu z soczewkami kontaktowymi PEGAVISION. Specjaliści powinni omówić z pacjentem zalecenia dotyczące pielęgnacji soczewek, w tym zarówno podstawowe informacje o pielęgnacji, jak i szczegółowe instrukcje dotyczące zalecanego dla pacjenta trybu postępowania przy pielęgnacji.

Zalecenia podstawowe:

Czas poświęcony na pielęgnację soczewek kontaktowych pomaga w zachowaniu zdrowia oczu.
• W przypadku zapisania soczewek specjalista powinien zalecić odpowiedni system pielęgnacji soczewek i przekazać pacjentowi zalecenia odpowiednio do etykiety umieszczonej na opakowaniu.
• Uwaga: Niektóre rozorty mogą spełniać więcej niż jedną funkcję, co zostanie wskazane na etykiecie. Zapoznać się z etykietą na opakowaniu rozortu i przestrzegać zaleceń.

Tryb postępowania podczas pielęgnacji soczewek:

Pacjenci muszą przestrzegać zalecanego przez specjalistę trybu postępowania podczas pielęgnacji soczewek kontaktowych PEGAVISION. Nieprzestrzeganie procedury może spowodować rozwój poważnych infekcji okularu oka.

Pielęgnacja wysuszonych (odwodnionych) lub suchych soczewek:

Jeśli miękka hydrofrowa soczewka kontaktowa jest wystawiona na działanie powietrza, kiedy znajduje się poza okiem, może dojść do jej wysuszenia i twardości. Ostrzeżenie: Jeśli soczewka jednorazowa wyschnie całkowicie, należy ją natychmiast wyrzucić.

Pielęgnacja przylegających (nieprzemieszczających się) soczewek:

Jeśli soczewka przylega (nie można jej przemieścić), należy zastosować w oku rozort nawilżający lub ponownie zwilżyć. Należy zastosować 3 do 4 kropli zalecanego rozortu nawilżającego lub zwilżającego bezpośrednio do oka i przed wyjęciem odczekać do czasu, aż soczewka zacznie się swobodnie przemieszczać na oku. Jeśli brak ruchu soczewki utrzymuje się po 15 minutach, należy NATYCHMIAST skonsultować się ze specjalistą.

• Wszystkie soczewki, które zostały otwarte, muszą zostać poddane dezynfekcji po każdym założeniu, a przynajmniej raz w tygodniu. Nieotwarte soczewki są sterylne i nie muszą być dezynfekowane do momentu naruszenia zamknięcia opakowania.
• Soczewki kontaktowe PEGAVISION muszą być przechowywane wyłącznie w zalecanym rozortwie.

• Soczewki zawsze, kiedy nie są noszone, należy przechowywać całkowicie zanurzone w zalecanym rozortwie dezynfekującym/kondycjonującym.
• Jeśli soczewka odwadnia się, należy zapoznać się z powyższym punktem dotyczącym dbania o wysuszone (odwodnione) LUB suche soczewki.

Przechowywanie:

• Produkt transportować i przechowywać w temperaturze pokojowej.
• Przechowywać w temperaturze pokojowej i unikać ekspozycji na światło słoneczne.
• Jeśli soczewka była przypadkowo przechowywana w temperaturze wyższej od temperatury przechowywania (15-25°C), jak na przykład w samochodzie w południe w lecie lub na mrozie, temperatura przechowywania krótkotrwałego nie wpływa na działanie soczewki i opakowanie asetyczne, ale nie oznacza to, że może ona przekroczyć temperaturę przechowywania przez kilka tygodni lub miesięcy. Jeśli doszło do przekroczenia temperatury przechowywania, takie soczewki należy zutć w pierwszej kolejności. Przed otwarciem opakowania sterylnego należy powrócić do temperatury pokojowej i upewnić się, że nie ma przecieków z opakowania asetycznego. W razie przecieków należy wyrzucić soczewki i unikać ich stosowania.

SITUACJE AWARYJNE

Pacjenta należy poinformować, że jeśli jakiegokolwiek środki chemiczne (produkty gospodarkstwa domowego, środki stosowane w ogrodnictwie, chemikalia laboratoryjne, itp.), przynę do oczu, pacjent powinien: NATYCHMIAST PRZEMYĆ OCZY WODĄ Z KRAJNU. A NASTĘPNIE OD RAZU ZDĄĆ SOCZEWKI. BEZWOLNOŚCIE SKONTAKTOWAĆ SIĘ ZE SPECJALISTĄ LUB UDĄĆ SIĘ DO SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO.

SPOŚÓB DOSTAWY

Każda soczewka kontaktowa na etykiecie opakowania blisterowego oznaczona jest numerem partii produkcyjnej soczewki, krzywą bazową, mocą sferyczną, mocą cylindryczną, osią, średnicą i datą przydatności.

PEGAVISION Corp
NO 5, SHING YEH ST., GUISHAN DIST.,
TAOYUAN CITY 333, TAIWAN (R.O.C.)
http://www.pegavision.com/tw/

PEGATRON Czech s.r.o.
Na Rovine 862, 720 00, Olstava-Hrabova, Czech Republic
Tel.: +420 553 031 111

Uwaga:



SYMBOL	OPIS
	Certyfikacja produktu Numer jednostki notyfikowanej: 2460
	Patrz ulotka z instrukcją
	Kod partii
	Sterylizowane z użyciem pary
	Użyć do Wyrażone jako: RRRR-MM lub RRRR-MM-DD RRRR – MM
	PRZESTROGA: Przepisy federalne ograniczają sprzedaż urządzenia wyłącznie na zamówienie lub receptę lekarza.
	Zapoznać się z instrukcją użytkowania
	Nie wolno stosować, kiedy opakowanie jest uszkodzone
	Blokowanie UV (Znak wskazuje na funkcjonalne blokowanie promieniowania UV, jest to symbol przypominający).
BC	Krzywa bazowa (właściwość produktu)
C.T.	Gruńość środkowa (właściwość produktu)
D	Dioptrie (moc soczewki) (właściwość produktu)
	Nie stosować ponownie
	Nie sterylizować ponownie
EC REP	Autoryzowany przedstawiciel w Unii Europejskiej
	Producent
	Ograniczenie temperatury
	Prawidłowa orientacja soczewki
	Nieprawidłowa orientacja soczewki (Soczewka odwrócona)