

Początkowe objawy niektórych zadręgań i wczesnej infekcji rogówki są czasami podobne. Takie użycie nabożników, jeśli nie są leczone prawidłowo, mogą rozwinąć się w owożenie infekcyjne. W celu zapobieżenia poważnemu postępowi takich stanów pacjent wykonujący opaskę kontaktową i wczesnej infekcji rogówki powinni zostać poddani badaniom jak przy potencjalnym nagłym zagrożeniu zdrowia, być odpowiednio leczeni oraz, jeśli konieczne, zostać skierowani do specjalisty od rogówki. Standardowe leczenie otarcia rogówki, takie jak łusanie oczu lub użycie sterydów lub kombinacji sterydów/leki, może spowodować nasilenie stanu. Jeśli pacjent nosi szkiełko kontaktowe podczas badania na oku, którego dotyczy problem, należy natychmiast zdjąć soczewkę i powinna ona wraz z płynem do pielęgnacji soczewki zostać zachowana do analizy i hodowania bakterii.

DOPASOWANIE

- Soczewka musi odpowiednio przemieszczać się po oku celem odpowiedniego dopasowania. Jeśli dopasowanie jest uznawane za zbyt ciasne, pacjentowi należy ponownie dopasować soczewkę, które spełniają kryteria dobrej dopasowania soczewek.
- Techniki dopasowania stosowane w przypadku twardych soczewek kontaktowych mogą nie mieć zastosowania w przypadku twardych soczewek.

HARMONOGRAM NOSZENIA

Zaleca się, aby osoba nosząca soczewki kontaktowe spotykała się ze specjalistą dwa razy do roku lub w razie zalecenia częściej.
Noszenie codzienne:
W przypadku **NOWEGO** pacjenta noszącego soczewki codzienne mogą początkowo występować tendencja do ich zbyt długiego noszenia. Początkowy harmonogram noszenia soczewek dla takich pacjentów powinien zostać wyrażone poddany. Harmonogram noszenia powinien zostać wyznaczony przez specjalistę. Maksymalny superywany czas noszenia dla soczewek PEGAVISION wynosi:

DOBA	1	2	3	4	5	8
GODZINY	5	7	10	12	14	Wszystkie godziny aktywności ruchowej

NIE WOLNO nosić soczewek w ciągu nocy lub podczas snu.

OKRESOWA PLANOWANA WYMIANA

W planowym programie wymiany harmonogram wymiany określany jest przez specjalistę na podstawie stanu fizjologicznego pacjenta. Producent soczewek kontaktowych zaleca następujący harmonogram wymiany dla tych soczewek, do przepłukania w Planowym programie wymiany (Specjaliści może zalecić krótsze lub dłuższe od sugerowanych interwały wymiany na podstawie wyników badań klinicznych pacjenta, profesjonalnego oparcia i doświadczenia kliniczni z soczewkami, ponieważ różna jest reakcja indywidualna na soczewki).
• Jednorazowe miękkie soczewki kontaktowe do codziennego noszenia: Wymieniać codziennie
Harmonogram noszenia (UWAGI PATRZ P. CZAS NOSZENIA)

Soczewka kontaktowa do codziennego noszenia	Zawartość wody	Harmonogram użycia	Blockowanie UV	Noszenie
Jednorazowe miękkie soczewki kontaktowe do codziennego noszenia	58%	1 doba	Tak	Codziennie

ZALECENIA DOTYCZĄCE PIELĘGNACJI SOCZEWKI

- Soczewki **codziennie** są wyrzucane po zdjęciu ich z oka **kądnego dnia**.
 - Soczewki **codziennie** powinny być czyszczone, płukane i dezynfekowane jedynie w sytuacjach awaryjnych, kiedy nie ma możliwości wymiany soczewki na nową.
- Planowana wymiana:**
Pacjenci muszą przestrzegać zalecanego trybu postępowania przy pielęgnacji. Nieprzestrzeganie całości trybu postępowania zgodnie z informacjami producenta zawartymi na ulocie w opakowaniu oraz zaleceń dla pacjenta może spowodować problemy (lub doprowadzić do rozwoju poważnych komplikacji ocznych zgodnie z opisem w punkcie OSTRZEŻENIA).
Specjaliści powinni omówić z pacjentem zalecenia dotyczące pielęgnacji soczewek, w tym zarówno podstawowe informacje o pielęgnacji, jak i szczegółowe instrukcje dotyczące zalecanego dla pacjenta trybu postępowania przy pielęgnacji. **ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE PIELĘGNACJI SOCZEWKI i zalecenia podstawowe.**

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE PIELĘGNACJI SOCZEWKI

Ponizsze rozróżny są zalecanymi rozróżnami do pielęgnacji soczewek do użyciu z soczewkami kontaktowymi PEGAVISION. Specjaliści powinni omówić z pacjentem zalecenia dotyczące pielęgnacji soczewek, w tym zarówno podstawowe informacje o pielęgnacji, jak i szczegółowe instrukcje dotyczące zalecanego dla pacjenta trybu postępowania przy pielęgnacji.

Zalecenia podstawowe:
Czas poświęcony na pielęgnację soczewek kontaktowych pomaga w zachowaniu zdrowia oczu.
• W przypadku zapisania soczewek specjalista powinien zalecić: odpowiedni system pielęgnacji soczewek i przekazać pacjentowi zalecenia odpowiednio do etykiet umieszczonych na opakowaniu.
• Uwaga: Niektóre rozróżny mogą spełniać więcej niż jedną funkcję, co zostanie wskazane na etykiecie. Zapoznać się z etykietą na opakowaniu rozróżny i przestrzegać zaleceń.
Tryb postępowania podczas pielęgnacji soczewek:
Pacjenci muszą przestrzegać zalecanego przez specjalistę trybu postępowania podczas pielęgnacji soczewek kontaktowych. Nieprzestrzeganie procedury może spowodować rozwój poważnych infekcji oka lub dla.

Pielęgnacja wysuszonych (odwodnionych) lub suchych soczewek:
Jeśli miękka hydrofobowa soczewka kontaktowa jest wystawiona na działanie powietrza, kiedy znajduje się poza okiem, może dojść do jej wysuszenia i łamliwości. Ostrzeżenie: Jeśli soczewka jednorazowa wyschnie całkowicie, należy ją natychmiast wyrzucić.

Pielęgnacja przylegających (nieprzemieszczających się) soczewek:
Jeśli soczewka przylega (nie można jej przemieścić), należy zastosować w oku rozróżny nawilżający lub ponownie zwilżający. Należy zastosować 3 do 4 kropli zalecanego rozróżny nawilżającego lub zwilżającego bezpodstawnie do oka i przed użyciem odczekać do czasu, aż soczewka zacznie się swobodnie przemieszczać na oku. Jeśli brak ruchu soczewki utrzymuje się po 15 minutach, należy NATYCHMIAST skonsultować się ze specjalistą.
• Wszystkie soczewki, które zostały owarte, muszą zostać poddane dezynfekcji po każdym zakładaniu, a przynajmniej raz w tygodniu. Niewładowe soczewki są sterylne i nie muszą być dezynfekowane do momentu naruszenia zamknięcia opakowania.
• Soczewki kontaktowe muszą być przechowywane wyłącznie w zalecanym rozróżny.
• Soczewki zawsze, kiedy nie są noszone, należy przechowywać całkowicie zanurzone w zalecanym rozróżny dezynfekującym/kondycjonującym.
• Jeśli soczewka odwadnia się, należy zapoznać się z powyższym punktem dotyczącym owaru o wysuszone (odwodnione) LUB suche soczewki.

Przechowywanie:
• Produkt transportować i przechowywać w temperaturze pokojowej.
• Przechowywać w temperaturze pokojowej i uniknąć ekspozycji na światło słoneczne.
• Jeśli soczewka była przypadkowo przechowywana w temperaturze wyższej od temperatury przechowywania (15-25°C), jak na przykład w samochodzie w południe w lecie lub na morze, temperatura przechowywania krótkotrwałego nie wpływa na działanie soczewki i opakowanie aseptyczne, ale nie oznacza to, że może ona przekroczyć temperaturę przechowywania przez kilka tygodni lub miesięcy. Jeśli doszło do przekroczenia temperatury przechowywania, takie soczewki należy złożyć w pierwszej kolejności. Przed otwarciem opakowania sterylnego należy powrócić do temperatury pokojowej i upewnić się, że nie ma przekroczeń z opakowania aseptycznego. W razie przekroczeń należy wyrzucić soczewki i uniknąć ich stosowania.

SITUACJE AWARYJNE

Pacjenta należy poinformować, że jeśli jakiegokolwiek środka chemicznego (produkty gospodarskie domowe, środki stosowane w ogrodnictwie, chemikalia laboratoryjne, itp.), prężny na oczach, pacjent powinien:
NATYCHMIAST PRZEMYĆ OCZY WODĄ Z KRAJNU A NASTĘPNIE OD RAZU ZDJĄĆ SOCZEWKI. BEZWOLNIE SKONTAKTOWAĆ SIĘ ZE SPECJALISTĄ LUB UDAĆ SIĘ DO SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO.

SPOSÓB DOSTAWY

Każda soczewka kontaktowa na etykiecie opakowania błotrowego oznaczona jest numerem partii produkcyjnej soczewki, krzywą bazową, mocą sferyczną, mocą cylindryczną, osią, średnicą i datą przydatności.

PEGAVISION Corp
NO. 5, SHING YEH ST., GUISHAN DIST., TAOYUAN CITY 333,
TAIWAN (R.O.C.)
<http://www.pegavision.com/tai>

PEGATRON Czech s.r.o
Na Rovine 862, 720 00, Ostrava-Řabova, Czech Republic
Tel.: +420 553 031 111

Uwaga:



SYMBOL	OPIS
	Certyfikacja produktu Numer jednostki notyfikowanej: 2460
	Patrz ulotka z instrukcją
	Kod partii
	Sterylnizowane z użyciem pary
	Użyj: Wyraźone jako: RRRR-AMM lub RRRR-AMM-DD RRRR - MM
	PRZESTROGA: Przepisy federacyjne ograniczają sprzedaż urządzenia wyłącznie na zamówienie lub receptę lekarza.
	Zapoznać się z instrukcją użytkownika
	Nie wolno stosować, kiedy opakowanie jest uszkodzone
	Blockowanie UV (Znak wskazuje na funkcjonalne blockowanie promieniowania UV, jest to symbol przypominający).
C.T.	Grubość środkowa (właściwość produktu)
D	Dioptrie (moc soczewki) (właściwość produktu)
BC	Krzywa bazowa (właściwość produktu)
CYL	Moc cylindra (właściwość produktu dla soczewki torcyjnej)
Axis	Oś (właściwość produktu dla soczewki torcyjnej)
ADD	MOC DODATKOWA (właściwość produktu dla soczewki wielogniskowej)
	Nie stosować ponownie
	Nie sterylnizować ponownie
	Autoryzowany przedstawiciel w Unii Europejskiej
	Producent
	Ograniczenie temperatury
	Prawidłowa orientacja soczewki
	Nieprawidłowa orientacja soczewki (Soczewka odwrócona)